


NEATER DRINKER - BRUGSVEJLEDNING

Neater Drinker er en robust kop med låg og et langt sugerør.
Det solide sugerør kan bøjes i alle retninger, så det er nemt at nå. En ventil i bunden forhindrer tilbageløb af væsken i sugerøret og gør det lettere at suge.
Koppen er meget stabil og har non-slip bund.
Et låg holder sugerøret på plads og holder varme drikke varme.

Kopper, sugerør og ventil til sugerør kan købes separat.

Vægt: 590 g
Kapacitet: ca. 4 dl

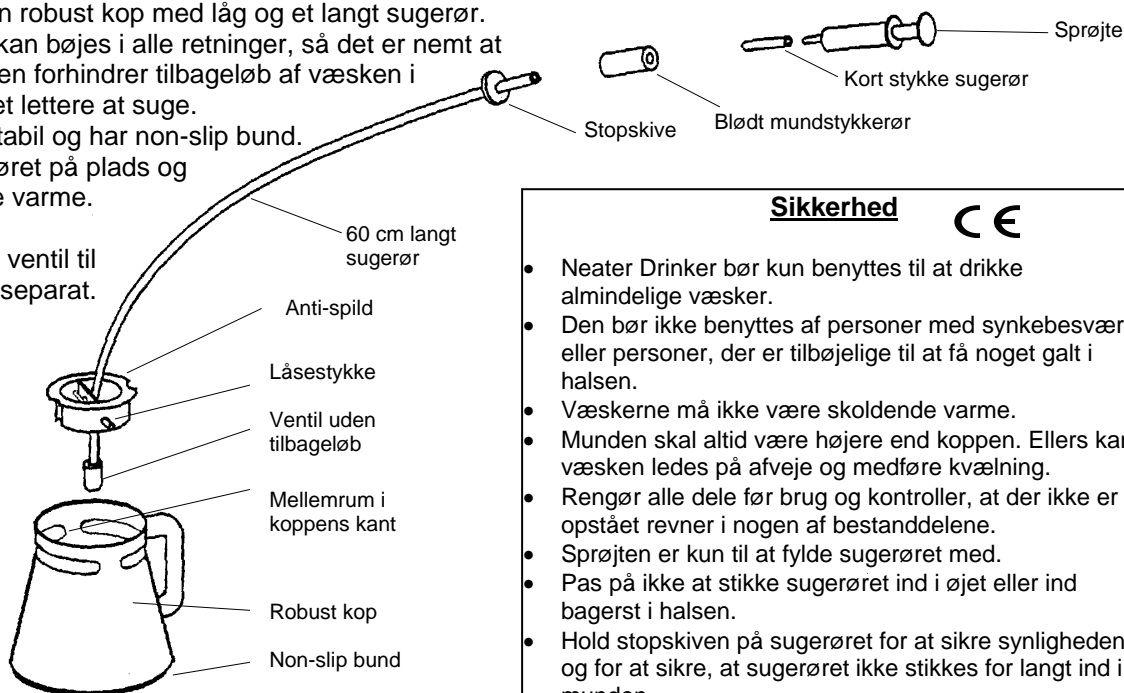

Sikkerhed



- Neater Drinker bør kun benyttes til at drikke almindelige væsker.
- Den bør ikke benyttes af personer med synkebesvær eller personer, der er tilbøjelige til at få noget galt i halsen.
- Væskerne må ikke være skoldende varme.
- Munden skal altid være højere end koppen. Ellers kan væsken ledes på afveje og medføre kvælning.
- Rengør alle dele før brug og kontroller, at der ikke er opstået revner i nogen af bestanddelene.
- Sprøjten er kun til at fylde sugerøret med.
- Pas på ikke at stikke sugerøret ind i øjet eller ind bagerst i halsen.
- Hold stopskiven på sugerøret for at sikre synligheden og for at sikre, at sugerøret ikke stikkes for langt ind i munden.
- Blødt mundstykkerør kan reducere skader.

At samle Neater Drinker:

- Skub sugerøret gennem hullet i låget.
- Drej låget rundt for at løsne det.
- Tryk ventilen fast nederst på sugerøret (enden uden stopskive).
(Sugerøret kan blødgøres ved at lægge det i varmt vand.)

At fylde Neater Drinker:

- Drej låget rundt for at løsne det. Sørg for, at alle dele er rene og ikke har nogen revner.
- Kom ikke for meget i koppen.
- Sørg for, at sugerøret er skubbet tilstrækkeligt langt ned til, at det når helt ned i bunden af koppen.
- Sæt låget på igen og sørg for at placere låsestykket på linje med mellemrummene i koppers kant; drej låget for at sætte det godt på plads.

Placer sugerøret tæt på munden

Sugerøret kan bøjes i position – undgå at lave knæk på det ved at bøje det omkring en rundet genstand (f.eks. en anden kop) eller lad tommelfingeren løbe langs sugerøret, mens det bøjes gradvist. Opvarmning af sugerøret kan gøre det lettere at bøje det. Sørg for, at sugerørets absolut højeste punkt er ved enden ved munden.

Sugerøret kan kortes ned med en skarp kniv, hvis det ønskes – vær forsigtig! Skub stopskiven ned forbi det sted, hvor det ønskes, at sugerøret først skal skæres. (Skær ikke i bunden af sugerøret. Denne del er specielt formet til at arbejde sammen med ventilen). Fjern skarpe kanter.

Et 120 cm sugerør kan købes.

Det er kun nødvendigt at suge stille og roligt for at benytte Neater Drinker

Ventilen uden tilbageløb i bunden af sugerøret sikrer, at væsken ikke løber tilbage i koppen. Hvis der bliver suget meget forsigtigt, tager det nogle sekunder at fylde sugerøret. Når det er fyldt, vil alle sug give lidt at drikke. Hvis suget er meget svagt, kan det hjælpe at korte sugerøret ned og placere koppen højere oppe (men aldrig højere end munden).

Hjælp til det første sug – sugerøret kan fyldes op på forhånd med en sprøjte

Tryk stemplet på sprøjten ind, og indsæt sprøjtes spids øverst på sugerøret. Træk gradvist stemplet ud for at suge væsken op i sugerøret.

Hvis sugerøret har et ekstra mundstykke for enden, skal det ekstra korte stykke sugerør sættes på sprøjtes spids for at sikre god pasform i mundstykket, når hovedsugerøret fyldes.

Blødt plastikstykke kan sættes over sugerørets endestykke som mundstykke

Benyttes af personer med et kraftigt bid eller for at beskytte gummer eller øjne, specielt i forbindelse med tremor.

Nogle personer foretrækker at benytte Neater Drinker uden ventil (den kan trækkes af). På denne måde undgås, at drikkevarer med brus stiger op i sugerøret, eller at varme drikke bliver kolde, hvis de står for længe i sugerøret.

Rengøring

Vi anbefaler opvask i hånden og brug af en steriliserende opløsning. Det er ikke nødvendigt at fjerne ventilen. Opvaskemaskine kan benyttes, men det forkorter Neater Drinkers holdbarhed. Dette gælder også for steriliseringssystemer. Hvis der benyttes opvaskemaskine, anbefaler vi en placering på øverste hyde, eftersom dette oftest er mindre hårdt for produktet.

Neater
Solutions Ltd.



JADEA / Janne Mottlau

+45 2323 0055
fax 3536 3559
post@jadea.dk
www.jadea.dk